

deconex® OPHTHALMICS H

Gebrauchsfertiger Brillenglasreiniger für die tägliche Pflege

Für die manuelle Anwendung



Verwendung

deconex® OPTHALMICS H ist ein gebrauchsfertiger Reiniger für die tägliche Reinigung und Pflege von Brillengläsern.

Eigenschaften

deconex® OPTHALMICS H entfernt wirksam Staub, Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen, die sich aufgrund des täglichen Brillentragens auf dem Glas niedersetzen. deconex® OPTHALMICS H hinterlässt keine Rückstände und ist angenehm parfümiert.

Inhaltsstoffe

Lösungsmittel, Netzmittel, Parfüm

Dosierung

deconex® OPTHALMICS H einfach auf ein geeignetes, keine Kratzer verursachendes Brillentuch auftragen und die Brillengläser abwischen.

Chemisch-/physikalische Daten

Dichte	Konzentrat	0.88 g/mL
Aussehen	Konzentrat	klar, farblos
Flammpunkt	Konzentrat	24 °C

Lieferung

Bitte fragen Sie Ihre Vertretung nach den aktuellen Gebindegrößen.

Die Gebinde, Verschlüsse und Etiketten sind aus recycelbarem Polyethylen.

Anwendungshinweise

deconex® OPTHALMICS H enthält leicht brennbare Lösungsmittel. Bei der Lagerung daher direkte Sonneneinstrahlung und Lagerung oberhalb 22 °C vermeiden.

Materialverträglichkeit

Geeignet für:
Mineralglas, Kunststoffglas

Für nicht genannte Materialien sind eigene Verträglichkeitsuntersuchungen durchzuführen oder bei Borer Chemie AG in Auftrag zu geben.

Zusätzliche Informationen

Hinweise zu Arbeitsschutz, Lagerung und Entsorgung/Abwasser entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns für praktische Informationen zu Ihrer spezifischen Anwendung.

deconex® OPTHALMICS H

Hersteller:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.swiss

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.